



Aérosol de froid

■ Gamme Urgence & Accessoires

RÉFÉRENCE : AER 6054 FR

Gencod : 8033196352006



Dimensions :
270 ml brut – 200 ml net

COMPOSITION

DESCRIPTIF & PROPRIETES DU PRODUIT ACTIF

Le froid provoque un écart thermique instantané lors des interventions sur les terrains de sports (football, rugby, volley ball...).

Il soulage la douleur causée par des traumatismes, des contusions, des chutes ou des foulures et dans tous les cas nécessitant une cryothérapie et une application de froid.

Son effet anesthésique induit par le refroidissement de la zone contusionnée permet la reprise rapide de l'activité sportive.

PROPRIETES DU PRODUIT ACTIF

Provoque un écart thermique instantané, et stoppe la douleur

UTILISATION ET MODE D'EMPLOI

Pulvériser sur l'endroit concerné en gardant une distance d'au moins 15 à 20 cm pendant 3 à 4 secondes.

Arrêter l'application lorsqu'apparaît un léger givre blanc.

Répéter l'application si nécessaire. L'anesthésie mécanique à l'aide de froid, élimine momentanément la douleur.

Usage externe.

Dispositif médical de classe IIa

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.